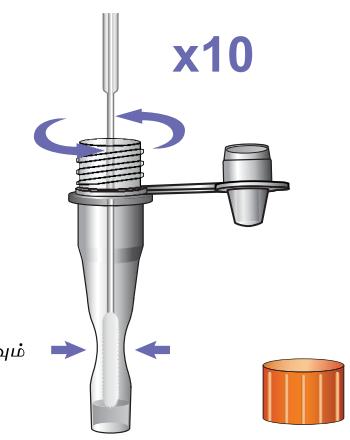




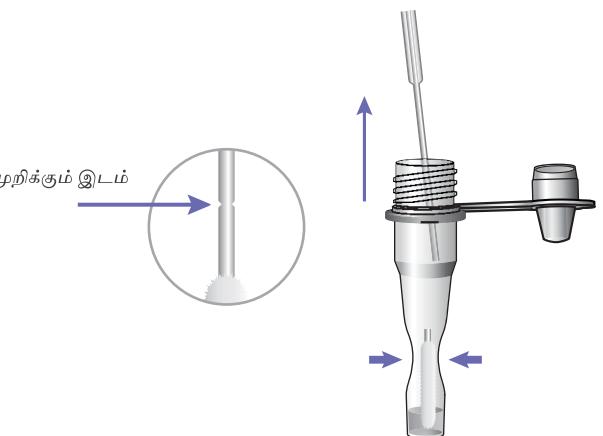
மூக்கில் செலுத்தியதுடைப்பானே, குழாயில் மூள்பே நிரப்பப்பட்டுள்ள இடைநிலை கரைசவில் மூழ்கடிக்கவும். குழாயின் அடிப்பகுதியை பிடித்துக்கொண்டு, இடைநிலை கரைசவில் துடைப்பான் நன்கு மூழ்கி இருப்பதை உறுதிசெய்ய, மூக்கில் செலுத்தியதுடைப்பானை 10 முறை திருக்கவும்.



இங்கே பிடிக்கவும்

**x10**

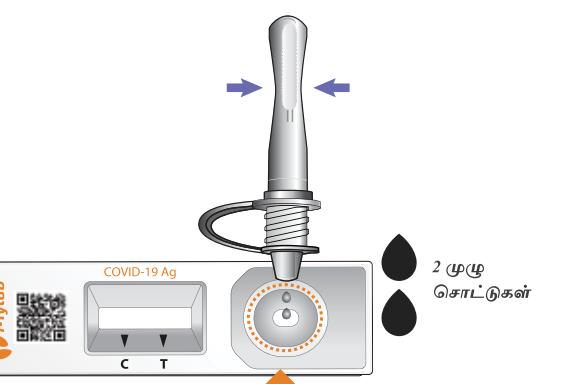
துடைப்பானின் முறிக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்கவும் முறிக்கும் இடத்தில் துடைப்பானை முறிக்கவும் துடைப்பானின் எஞ்சிய பகுதியை குப்பையில் இடவும். நன்கு கலக்கவும்



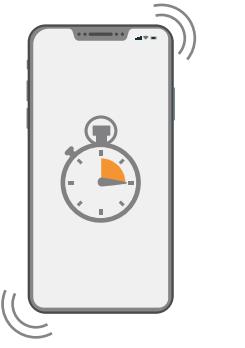
கொடுக்கப்பட்டுள்ள துளையை முனையை பயன்படுத்தி குழாயை மூடி, மூடியை இறுக்கமாக மூடவும்.

**பாட 3**

ப்யூபை அமுத்தி சோதனை சாதனத்தின் சாம்பிள் குழியில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டிஜென் இடையக் கலவையின் 2 முழு துளிகளை சேர்க்கவும் மற்றும் முடிவுகள் வரும் வரை 10-15 நிமிடங்கள் வரை காத்திருக்கவும்.



முடிவை 15 நிமிடங்களுக்குள் படியுங்கள். வலுவான பாசிட்டிவ் முடிவுகளை 10-15 நிமிடங்களுக்குள் தெரிவிக்கலாம். 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு தோன்றும் முடிவுகள் செல்லுபடியாகாது.

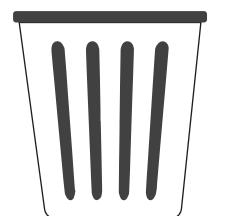
**சோதனை முடிவுகளை கண்டறிய உங்களுடைய போன்ற எச்சரிக்கை செய்யும்****பாட 4**

சோதனைக் கருவியை எடுத்து அதை புகைப்படம் எடுக்கவும்.

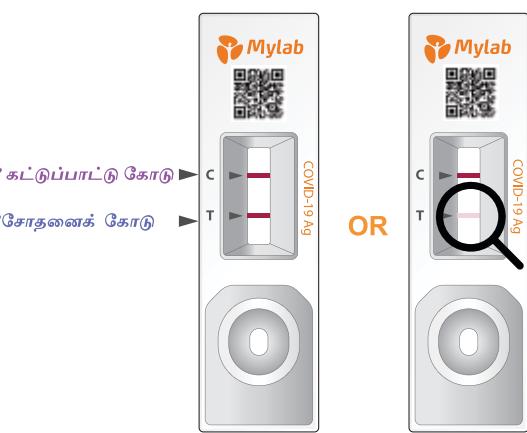
**பயன்பாடு உங்கள் கோவிட்-19 சோதனை முடிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து காண்பிக்க காத்திருக்கவும்.**

சாதன தொகுப்புதன் வழங்கப்பட்ட அப்து விளைவிக்கும் உயிரியல் பொருத்தங்களைப் பாதிக்க தீர்க்காண்டு உயிரியல் பாதுகாப்பு சேமிப்பை வழங்குகிறது.

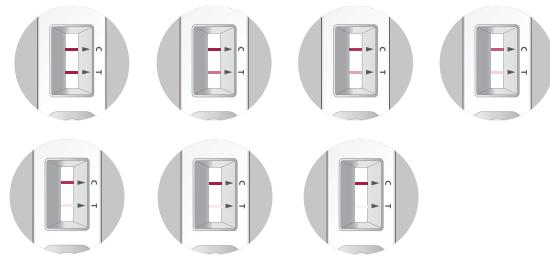
COVID-19 மற்றும் பிற வைரஸ்களைக் கொல்லும் லிசிஸ் பஸ்பர் குழாயில் ஸ்வாப் செருகப்படுகிறது. உடைந்த ஸ்வாப் தலை உள்ள இந்த குழாய் சோதனையின் பிற கூறுகளுடன் அகற்றும் பைக்குள் வைக்கப்பட்டு வீட்டுக் கழிவுகளில் லீச்ப்பட வேண்டும். மாதிரி தொட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மேற்பற்படுக்களையும் கிருமி நிக்கம் செய்து அதற்கிய பின் கைகளைக் கழுவவும்.

**நேர்மறை முடிவு**

கட்டுப்பட்டு கோடு “C” மற்றும் நோய் அறியும் கோடு இரண்டும் தோன்றினால், புதியவைக் கட்ரோனா வைரஸ் ஆண்டிஜென் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் முடிவு ஆண்டிஜென் கு நேர்மறையாக உள்ளது என்று பொருள்.

**நேர்மறை**

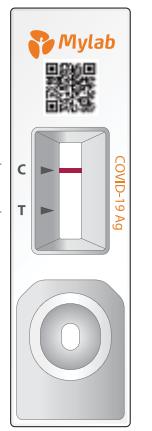
மிக நெருக்கமாக தோன்றுகின்றன! அதில் உள்ள கோடு மிகவும் மங்கலாக இருக்கலாம் இங்கே தெரியும் இந்த இளங்கிவப்பு/ ஊதா கோடு ஒரு நேர்மறையான முடிவைக் குறிக்கிறது.

**நேர்மறை முடிவுகளுக்கான பல்வேறு சாத்தியங்கள்**

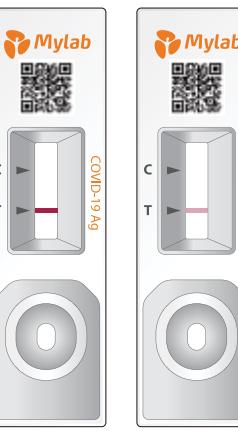
ஜி.சி.எம்.ஆர் வழிகாட்டுதல்கள்: நேர்மறைகளை/ பாசிட்டிவ்களை ஆக சேதிக்கப்படும் அனைத்து நூற்கணம் உண்ணையான நேர்மறைகளை/ பாசிட்டிவ்களைக் கருதப்படலாம். மேலும் மீண்டும் சோதனை தெவையில்லை. ஜி.சி.எம்.ஆர் மற்றும் கார்டா மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சர் (MoH & FWF) நெரிமறையின்படி வீட்டு தனியைப்படுத்துவல் மற்றும் கவனிப்பைப் பின்பற்ற அனைத்து டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்/ சோதனையில் நேர்மறை சொதிக்கப்பெற்ற நபர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்: <https://www.icmr.gov.in/chomcare.html>

**எதிர்மறை முடிவு**

தரக்கட்டுப்பாட்டு கோடு “C” மட்டும் உருவாகி, சோதனை கோடு “T” உருவாகவில்லை என்றால், சோதனை முடிவை எதிர்மறையானது என்று பொருள்.

**எதிர்மறை****செல்லுபடியாகாத்து**

கண்டுபிடிப்பு கோடு “T” தோன்றினாலும் தோன்றாவிட்டாலும், தோன்றாவிட்டாலும், தரக்கட்டுப்பாட்டு கோடு “C” தோன்றவில்லை என்றால் சோதனை செல்லுபடியாகாது.

**செல்லுபடியாகாத்து****அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்**

1. இந்த சோதனைப்பற்றி அறியப்பட்ட மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகள் மற்றும் நன்மைகள் யாவை? சோதனையினால் சாத்தியமான ஆபத்து வைபும் இல்லை. இருப்பிலும் பின்கண்ட அசௌகரியங்கள் உண்டால் கார்டா.
- மாதிரி எடுக்கப்பட்டபோது அசௌகரியம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
- சோதனை முடிவைகளை தவுக்க காட்டகடும் (முடிவுகள் பகுதியைப் பார்க்கவும்).
- சாத்தியான நன்மைகள் பின்வருமாறு:
  - உங்கள் காத்திருக்கும் இந்த முடிவுகள், பிற தகவுக்களுடன், உங்கள் கவனிப்பு குறித்து தொவிலிந்த பரிந்துகளை மெய்ய உதவுகின்றும்.
  - இந்த சோதனையின் முடிவுகள் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும், உங்கள் சமூகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் COVID-19 பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
2. இந்த சோதனை வல்லையை தருகா?
- இல்லை. நீடி துடைப்பன்னவைப்பெரினால் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கூர்மையானது அல்லது கூச்சமாக உணரக்கடும் உங்களுக்கு வலி ஏற்பட்டால், சோதனையை நிறுத்தி விட்டு, உடல்நலம் வழங்கின்றிடம் ஆலோசனை பெறுவதும்.
3. அண்டிஜென் மற்றும் மூலக்கூறு சோதனைக்கு இடையிலான வேறுபாடு?
  - மூலக்கூறு மற்றும் மூலக்கூறுக்கும் அண்டிஜென் மூலக்கூறுக்குமிக்கு போன்ற அனைத்து பொருளைப் பிறக்கின்றது. அது அல்லது ஆண்டிஜென் மூலக்கூறு அல்லது ஆண்டிஜென் மூலக்கூறு மற்றும் ஆண்டிஜென் மூலக்கூறு போன்ற அனைத்து பொருளைப் பிறக்கின்றது.

**செயல்மறையின் வரம்புகள்**

1. இந்த வினைப்பொருள், சோதனைக்கும் சோதனைக்கு மட்டும் பயன்படுகிறது.
2. இந்த வினைப்பொருள் பொதுவான கண்டுதலுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மாதிரியில் உள்ள புதுவிதமான கொரோனா வைரஸின் ஆண்டிஜென் இதனால் குறிப்பட்ட முடிவாய்.
3. சோதனை முறையை சிறியாக மின்பற்றாவிட்டால், சோதனை முடிவுகள் வெளிப்பாடு. சோதனையில் செயல்திறனை மோசமாக பாதிக்கலாம் மற்றும் தவறான முடிவை உருவாக்கலாம்.
4. ஒரு மாதிரியில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டிஜெனின் அளவு சேதனையின் உணர்நிறுத்துக்கூடுக்கு குறித்து இருந்தால், பிரதமான மற்றும் தவறான முடிவைப் பெற்றாலும்.
5. நேர்மறையின் முடிவுகள் இருந்தால், பிரதமான மற்றும் தவறான முடிவைப் பெற்றாலும்.

