



స్వాబ్ ని తీసుకొని ముందుగా నింపి ఇచ్చిన ఎక్స్‌ట్రాక్టన్ ట్లూట్ లో ముందండి. ట్లూట్ కింద నేడ్చి ప్రట్టుకొని స్వాబ్ ఎక్స్‌ట్రాక్టన్ బసర్ లో మునిగిపోయెలా స్వాబ్ ని 10 సార్లు తిప్పండి.

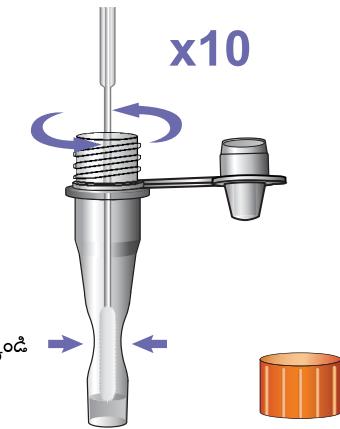


స్వాబ్ కి ట్లూట్ పాయింట్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట ఉండే చూడండి. ట్లూట్ పాయింట్ దగ్గర స్వాబ్ ని విరహండి. మిగిలిన స్వాబ్ ముక్కుని తీసుయండి. బాగా ఉఱండి.

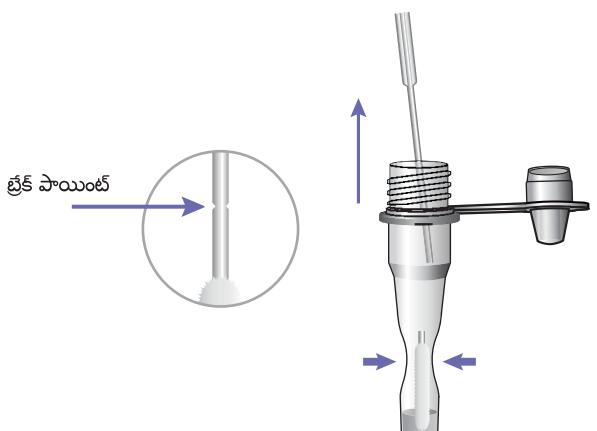

అట్టుకు నాజిల్ క్యాప్ తో ట్లూట్ ని కన్ఱ చేసి మూత్త విగించండి.




ట్లూట్ ని నెచ్చి, తీసున యాంటిజెన్ బసర్ ని తీసుమం 2 పూర్తి దుక్కలను పరికొస్తాలు యాంటిజెన్ వెల్ లో, పరితాలు కనిపించే వరకు 10-15 నిమిషాలు ఆగండి.

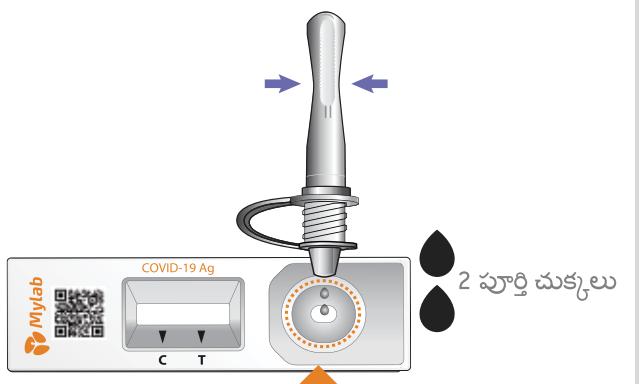

పరితాలను 15 నిమిషాల్లో తెలుసుకోండి. ఒల్ఫైన్ పాజటివ్ పరితాలు 10-15 నిమిషాల్లో తెలుసుయా. 20 నిమిషాల తర్వాత కనిపించే పరితాలు చెల్లవు.


పరికొన్ని తెలుసుకోవడానికి మీకు పోస్తే అలారం వస్తుంది

పరికొన్ని తీసుకొని పోటో తీయండి

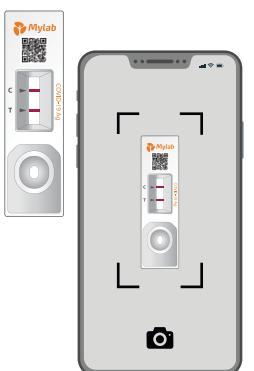


యాస్ మీ కోవిడ్ -19 పరికొన్న పరితాలను విశేషించి చూపడం కోసం వేచి ఉండండి.

కోవిడ్ -19 మరియు జతర పైరస్సను దంపే లైనీస్ బసర్ ట్లూట్లోనికి స్వాబ్ ని ఉండాలి. ఈ ట్లూట్ ని విరిచిన స్వాబ్ తల భాగం, ఇంకా ట్లూట్ కి సంబంధించిన మిగతా పస్పువులలో పాటు డిస్టో జల్ ట్లూట్ లో ఉంచి చెత్తబుట్టుాం వేయాలి. ఆ తరువాత నమూనా తగిలిన ప్రదేశాలను శుభ్రం చేసి తేలులు కడుక్కోండి.

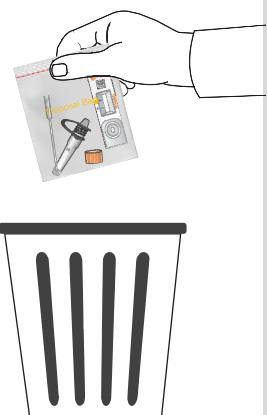


కౌలిటీ కంట్రోల్ ట్లైన్ "C" మరియు డిట్కన్ ట్లైన్ రెండూ కనిపీస్తు, నావల్ కర్రినాప్రెర్స్ యాంటిజెన్ ఉన్స్ట్రూట్, యాంటిజెన్ పరితాలు పాజటివ్ అయినట్లు.

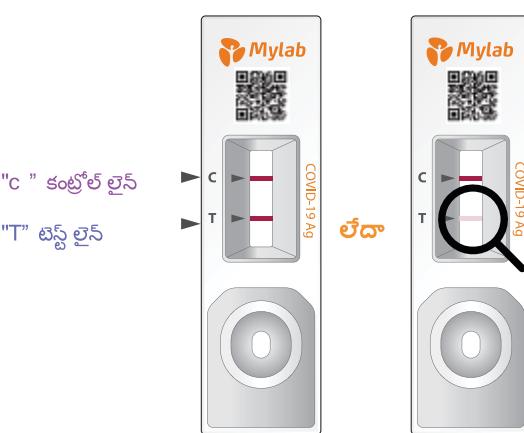


జగర్తగా చూడండి! కింది గీత దాలా అస్ప్రణాగా ఉండవచ్చు. ఇక్కడ కనిపించే గులాబీ/ ఊదారంగు గీత ఏదైనా, పాజటివ్ పరితాన్నే సూచిస్తుంది.

పాజటివ్ పరితాలు వివిధ కార్యాలు

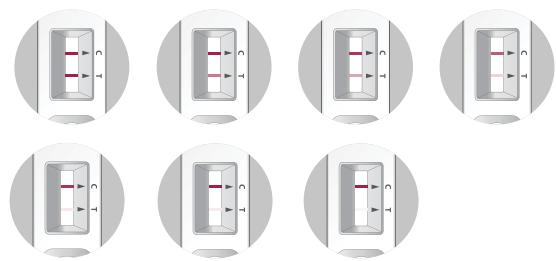


ICMR మార్గదర్శకాలు: పరికొన్న పాజటివ్ వ్యక్తులుదరిని నిజమైన పాజటివ్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ పరికొన్న అవసరం లేదు. • పాజటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులందరూ ఇంటిలోనే వారీలేవ్ లో ఉంటూ ICMR అర్థగ్ మరియు కుటుంబ సంబేహ మంత్రిత్రాబ్ (MoH & FW) సూచించిన విధంగా జగర్తలు తీసుకోవాలి పాజటివ్ పరితాలు: <https://www.icmr.gov.in/chomocare.html>.

కౌలిటీ కంట్రోల్ ట్లైన్ "C"
లేకపోతే, ట్లైన్ ట్లైన్ "T" ఉన్న
లేకపోయా ఆ పరితాలు చెల్లదు.

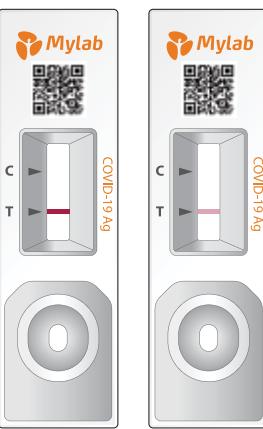

కౌలిటీ కంట్రోల్ ట్లైన్ "C" మాత్రమే కనిపీస్తు, ట్లైన్ ట్లైన్ "T" లేకపోతే పరితాలు నగటివ్ అయినట్లు.

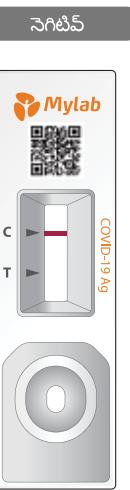

ICMR మార్గదర్శకాలు: • రోగులక్షణాలు కలిగి RAT దే నగటివ్ గా గుర్తుంచబడిన వ్యక్తులు RTPCR చేత వెంటనే పరిశీలించడాలి. తల్కుపై ప్రైన్ ఉన్న కొన్ని పాజటివ్ కేసులను RAT గుర్తుంచలకపోయే అవకాశం ఉన్నయిన జడి దాలా ముఖ్యం. • RAT దే నగటివ్ గా గుర్తుంచబడిన వ్యక్తులందరూ కోవిడ్ -19 అనుమానించుటగా లక్కుపైబడుతారూ కాబట్టి RTPCR పరితాలు వచ్చేవరకు ICMR/MoH & FW సూచించిన విధంగా ఇంటాల్ వేస్టోర్స్ లో ఉండాలి.

1. ఈ పరికొన్న పల్ల కార్బో ప్రమాదాలు, ప్రయాశనాలు ఏమిటి?

పరికొన్న పల్ల ప్రమాదం లేదు,

• అయితే నమూనా తీసుకొనే సమయంలో ఇఖ్యంది ఉండవచ్చు.

• తుప్ప పరికొన్న తెలుగు అవకాశం (పరితాలు చింగాం చూడండి).

బల్లమైన ప్రయాశనాలు?

• ఇతర విధాలలో పల్ల ఈ పరికొన్న పల్ల ప్రయాశం చేసే వ్యక్తీకి మీ పట్ల ఎటువంటి జగర్తలు తీసుకోవాలి తెలియజ్ఞీయాలి.

• ఈ పరికొన్న పల్ల మీ కుటుంబానికి మరియు మీ సంఘంలోని ఇంటరులకు కోవిడ్ -19 సోక్కుండా సహాయపడ్డాయి.

2. ఈ పరికొన్న పల్ల కోవిడ్ మాత్రమే?

లేదు, ఈ స్వాబ్ ప్రైలాట్ వారిచెట ప్రైల్ కొండా అంటాలు అందు, అందు వల్ల కోవిడ్ -19 స్వాబ్ పల్ల కేంటె అసాక్ష్యూగా లేదా చికాకూగా అనిపించవచ్చు. మీకు వేస్తే అనిపిస్తు, దయచేసి పరికొన్న ఆపి, మీ మైక్రో స్టుట్సుకొన్న లేదు అని అనుకోలేము.

3. యాంటిజెన్ పరికొన్న పరికొన్న పల్ల ఏమిటి?

మార్కియుల్ పరికొన్ అందులో అని కూడా అంటారు. పైర్ మొక్క ఇస్ట్రుమెంట్ కనుగొంటాయి. యాంటిజెన్ పరికొన్ పల్ల పైర్ మొక్క ఇస్ట్రుమెంట్ దాలా విస్ట్రోగ్ ఉంటాయి, కానీ నగటివ్ పరితాలు వస్తే ఇస్ట్రుమెంట్ లేదు అని అనుకోలేము.



* IOS: సాధారణ కెమ్మా సుండి స్వాన్
ఆండ్రాయిడ్: ఏదైనా QR క్షెడ్ స్వాన్ర యాస్ లో స్వాన్ చేయండి.